## Буфер, конц. 5:1, 200 мл, краситель Пунцовый С, 250 мл

Product Categories: Наборы реагентов для УЭФ-01

Product Page:

http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/elektroforez/acetat-cellyuloznye-plyonki/nabory-reagentov-dlya-uef-01/bufe r-konc-51-200-ml-krasitel-puncovyj-s-250-ml/

## **Product Summary**

Кат.№В-41323VL

Набор предназначен для электрофоретического разделения белков сыворотки крови на мембранах из ацетатцеллюлозы с последующим денситометрическим определением белковых фракций в КДЛ и в научно-исследовательской практике.

## **Product Description**

Буфер, конц. 5:1, 200 мл, краситель Пунцовый С, 250 мл Состав набора

Реагент 1 (Р1). Буферный раствор, концентрат – 200 мл

Реагент 2 (Р2). Краситель Пунцовый С – 250 мл

Дополнительный реагенты

Уксусная кислота, контрольная сыворотка, растворитель

Принцип метода

Принцип электрофоретического разделения белков основан на различной скорости движения белков сыворотки крови в постоянном электрическом поле определённой напряженности. Разделённые белковые фракции окрашиваются красителем. После денситометрического сканирования окрашенных фореграмм получают гистограмму распределения белковых фракций. Площадь под пиком белковой фракции пропорциональна содержанию этой фракции в сыворотке крови.

Анализируемые образцы

Сыворотка крови, свободная от гемолиза, липемии и не желтушная.

Оборудование и материалы

Прибор для электрофореза на мембранах из ацететцеллюлозы, мембраны из ацетатцеллюлозы, денситометр и сканер.