

Альбумин (Albumin FL)



Product Categories: [Белки](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/belki/albumin-albumin-fl/>

Product Summary

Набор реагентов для определения содержания Альбумина в сыворотке, плазме крови человека.

Кат.№	Фасовка набора
HS F100 VL	100 мл (2x50 мл+1x5 мл стандарт)
HS F500 VL	500 мл (4x125 мл+1x5 мл стандарт)

Product Description

Альбумин (Albumin FL) Время измерения - 2 минуты

В слабкокислой среде, сывороточный альбумин в присутствии бромкрезолового зеленого меняет цвет индикатора с желто-зеленого на сине-зеленый

Измерение по конечной точке: Альбумин + BCG ж-зеленый ? BCG-Альбумин

Монореагент/жидкий

Линейность - 60 г/л

Чувствительность - 1 г/л

628 нм (580-630) Абсорбция: ?BCG-Альбумин, наблюдаемый сине-зелёный цвет

Стандарт 40 г/л

Общий срок годности набора - 3 года

Температура хранения набора 2-8°C

Product data have been exported from - [ВЛ-Медиа](#)

Export date: Fri Nov 29 1:43:59 2024 / +0000 GMT

Анализируемый образец: сыворотка (предпочтительно), плазма с гепарином/эдта.

*Избегать венозного застоя, который может вызвать увеличение концентрации альбумина и других протеинов плазмы.