

## ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (ЛДГ FL DGKC)



Product Categories: [Ферменты и изоферменты](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofermanty/laktatdegidrogenaza-ldg-fl-dgkc/>

### Product Summary

Набор предназначен для определения активности Лактатдегидрогеназы в сыворотке, плазме (гепарин или эдта) крови человека

Кат.№	Фасовка набора
LD F060 VL	60 мл (6x8 мл+1x12 мл)
LD F120 VL	120 мл (12x8 мл+2x12 мл)
LD F245 VL	240 мл (12x16 мл+3x16 мл)

### Product Description

ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (ЛДГ FL DGKC)

ЛДГ ускоряет расщепление пирувата до L-лактата с окислением НАДН

Пируват + НАДН + H<sup>+</sup> ? L-Лактат + НАД<sup>+</sup>

Кинетический метод измерения: НАДН ? НАД<sup>+</sup>

Биреагент/жидкий (4:1, рабочий реагент стабилен 30 дней при 2-8°C)

Линейность: при активности фермента до 4000 Е/л

Чувствительность - 31 Е/л

340 нм Абсорбция: ?НАДН

Общий срок годности набора - 3 года

Product data have been exported from - [ВЛ-Медиа](#)  
Export date: Mon Apr 27 19:24:11 2026 / +0000 GMT

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка, гепарин-плазма или эдта