

ХОЛИНЭСТЕРАЗА (Cholinesterase FL IFCC/DGKC)

Product Categories: [Ферменты и изоферменты](#)

Product Page:

[http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofe
rmenty/xolinesteraza-cholinesterase-fl-ifccdgkc/](http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofe
rmenty/xolinesteraza-cholinesterase-fl-ifccdgkc/)

Product Summary

Набор предназначен для определения активности Холинэстеразы в сыворотке, плазме (ЭДТА или Гепарин) крови человека

| Кат.№ | Фасовка набора |
|------------|---------------------------|
| CH F096 VL | 96 мл (4x20 мл+1x16 мл) |
| CH F245 VL | 240 мл (12x20 мл+3x16 мл) |

Product Description

ХОЛИНЭСТЕРАЗА (Cholinesterase FL IFCC/DGKC)

Псевдохолинэстераза ускоряет гидролиз Бутирилтиохолина

Кинетический метод измерения: Гексацианоферрат III? Гексацианоферрат II

Оптимизирован IFCC/DGKC

Биреактив/жидкий (5:1, рабочий реагент стабилен 15 дней при 2-8°C

Линейность: при активности фермента до 25000 Е/л

Чувствительность - 432,3 Е/л

405 нм (Абсорбция: Гексацианоферрата III)

Общий срок годности набора - 3 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка, плазма с гепарином/эдта.

Избегать гемолиза