

Глюкоза (Glucose UV FL)

Product Categories: [Глюкоза и метаболиты углеводного обмена](#), [Диагностические наборы](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/glyukoza-i-metabolity-uglevodnogo-obmena/glyukoza-glucose-uv-fl/>

Product Summary

Набор реагентов для определения содержания Глюкозы в сыворотке, плазме крови и моче человека.

Кат.№	Фасовка набора
GL F600 VL	600 мл (4x120 мл+4x120 мл+1x5 мл стандарт)

Product Description

Глюкоза (Glucose UV FL) Время измерения - 5 минут

Ферментативно, Гексокиназа: Глюкоза + АТФ ? Глюкоза-6-фосфат + АДФ

Г6Ф-ДГ: Глюкоза-6-фосфат + НАД+ ? 6-Ф-Глюконат + НАДН + Н+

Измерение по конечной точке: НАД+ ? НАДН

Биреагент/жидкий (4:1, рабочий реагент стабилен 90 дней при 2-8°C)

Линейность - 700 мг/дл (39 ммоль/л)

Чувствительность - 1 мг/дл (0,05 ммоль/л)

340 нм Абсорбция: ?НАДН

Стандарт 100 мг/дл (5,55 ммоль/л)

Общий срок годности набора - 2 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка, плазма, моча раствор

* Негемолизированные пробы