


Холестерин ЛПВП (HDL-Direct FL)

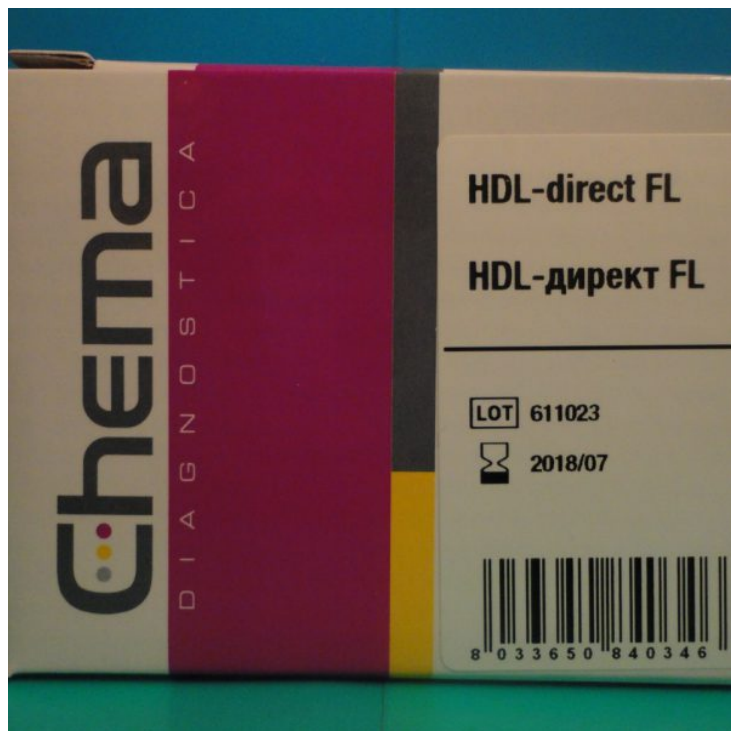

Product Categories: [Липиды и Липопротеины](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/lipidy/xolesterin-lpvp-hdl-direct-fl/>

Product Summary

Набор реагентов для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим методом (без осаждения).

Кат.№	Фасовка набора
HD F080 VL	80 мл (3x20 мл+1x20 мл)
HD F245 VL	240 мл (9x20 мл+3x20 мл)
HD F400 VL	400 мл (3x100 мл+1x100 мл)

Product Description

Холестерин ЛПВП (HDL-Direct FL)

Прямое иммуноингибирование липопротеинов LDL, VLDL, Хиломикроны, за исключением HDL. Образовавшиеся комплексы блокируют ферментативные реакции, за исключением ферментативной реакции с HDL

Ферментативно (ХЭ, ХО): ЛПВП ? Холестенон + Жирная кислота + H₂O₂

Пероксидаза: H₂O₂ + [N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметокси-4-фторанилин натриевая соль] + 4-ААП ?

Комплекс

Измерение по конечной точке: H₂O₂ + [N-этил-N-(2-Гидрокси-3- Сульфопропил)-3,5-Диметокси-4-Фторанилина натриевая соль] + 4-ААП ? Комплекс

Биреагент/жидкий (3:1)

Линейность - 220 мг/дл

Чувствительность - 1 мг/дл

600 нм Абсорбция: ?Комплекса, отражаемый (наблюдаемый) цвет - синий

Общий срок годности набора - 3 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка