


## Холестерин ЛПВП (HDL-Direct FL)

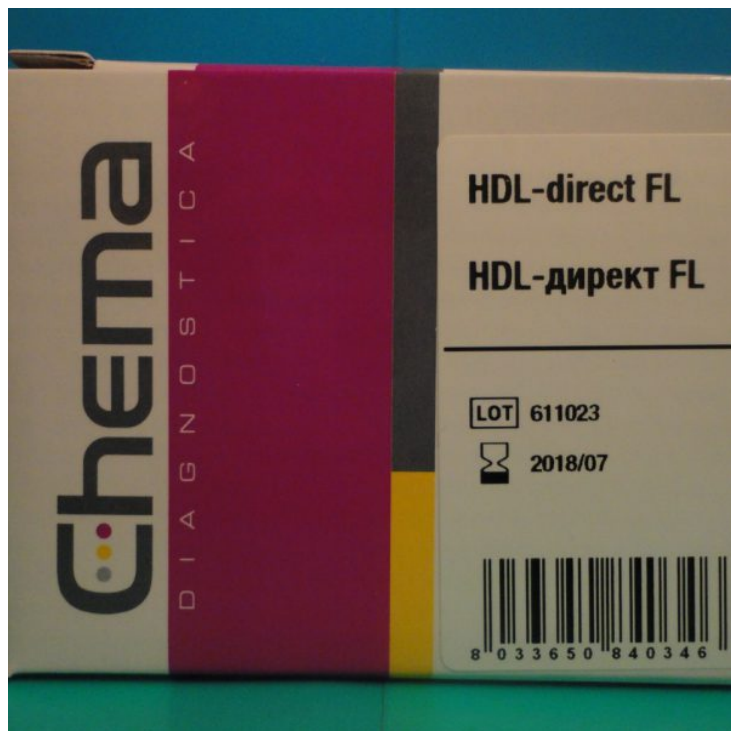

Product Categories: [Липиды и Липопротеины](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/lipidy/xolesterin-lpvp-hdl-direct-fl/>

### Product Summary

Набор реагентов для определения концентрации липопротеинов высокой плотности в сыворотке (плазме) крови энзиматическим методом (без осаждения).

| Кат.№      | Фасовка набора             |
|------------|----------------------------|
| HD F080 VL | 80 мл (3x20 мл+1x20 мл)    |
| HD F245 VL | 240 мл (9x20 мл+3x20 мл)   |
| HD F400 VL | 400 мл (3x100 мл+1x100 мл) |

### Product Description

Холестерин ЛПВП (HDL-Direct FL)

Прямое иммуноингибирование липопротеинов LDL, VLDL, Хиломикроны, за исключением HDL. Образовавшиеся комплексы блокируют ферментативные реакции, за исключением ферментативной реакции с HDL

Ферментативно (ХЭ, ХО): ЛПВП ? Холестерон + Жирная кислота + H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

Пероксидаза: H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + [N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметокси-4-фторанилин натриевая соль] + 4-ААП ?  
Комплекс

Измерение по конечной точке: H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + [N-этил-N-(2-Гидрокси-3- Сульфопропил)-3,5-Диметокси-4-Фторанилина натриевая соль] + 4-ААП ? Комплекс

Биреагент/жидкий (3:1)

Линейность - 220 мг/дл

Product data have been exported from - ВЛ-Медиа

Export date: Tue Apr 28 2:20:44 2026 / +0000 GMT

Чувствительность - 1 мг/дл

600 нм Абсорбция: ?Комплекса, отражаемый (наблюдаемый) цвет - синий

Общий срок годности набора - 3 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка