


Железо (Iron FZ)

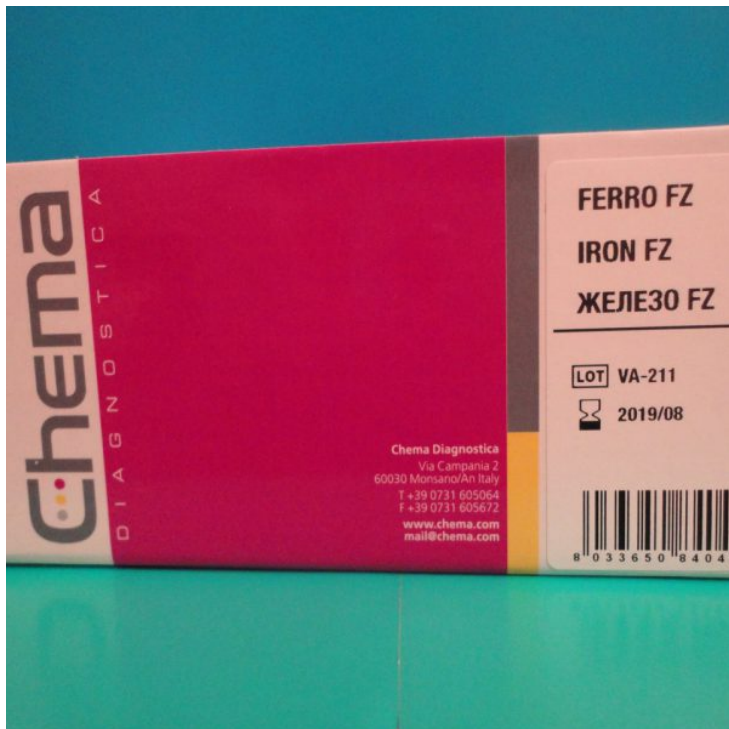

Product Categories: [Показатели метаболизма железа](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/pokazateli-metabolizma-zheleza/zhelezo-iron-fz/>

Product Summary

Набор реагентов для определения содержания Железа в сыворотке, плазме.

Кат.№	Фасовка набора
FEf F240 VL	240 мл (12x16 мл+2x24 мл+1x5 мл стандарт)
FEf F400 VL	400 мл (8x40 мл+3x40 мл+1x5 мл стандарт)

Product Description

Железо (Iron FZ)

Метод с Феррозином

Трансферрин-связанные ионы железа в образце освобождаются гуанидином и восстанавливаются: $Fe^{3+} + \text{Гидроксиламин} \rightarrow Fe^{2+}$

Измерение по конечной точке: $Fe^{2+} + \text{Феррозин} \rightarrow \text{Соединение}$

Биреагент/жидкий (4:1, рабочий реагент стабилен 90 дней при 2-8°C)

Линейность -1000 мкг/дл (179,31 мкмоль/л)

Чувствительность - 25 мкг/дл (4,48 мкмоль/л)

560 нм (540-580), Абсорбция: ?Соединение, наблюдаемый фиолетовый цвет

Стандарт 200 мкг/дл (35,81 мкмоль/л)

Общий срок годности набора - 3 года

Product data have been exported from - [ВЛ-Медиа](#)

Export date: Fri Nov 29 1:49:24 2024 / +0000 GMT

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка, гепарин-плазма

* Антикоагулянты: цитрат, оксалат и ЭДТА не должны использоваться.