

# Гематоксилин Джилла

Product Categories: [Красители](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/krasiteli-gistologicheskie-issledovaniya/gematoksilin-dzhilla/>

## Product Summary

См. описание ниже

## Product Description

Гематоксилин Джилла

Фасовка: 1 л

Назначение

Обеспечивает визуализацию ядер клеток в срезах (парафиновых, криостатных, вибротомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Предназначен для использования в качестве ядерного красителя при постановке иммуноцитохимических реакций в сочетании с различными типами хромогенов (в том числе и с растворимыми в этаноле) и для окраски гематоксилин-эозином. Достоинством гематоксилина Джилла в сравнении с наиболее часто применяемыми для прогрессивной окраски срезов гематоксилинами Майера и Карацци является интенсивная и чистая окраска ядер клеток без тенденции к перекраске как при короткой экспозиции 5-15 мин, так и при длительной – 1-24 ч. После длительного пребывания препаратов в гематоксилине Джилла обычно дифференцировки не требуется, так как перекрашивания не наступает. Это достоинство позволяет рекомендовать гематоксилин Джилла для применения в автоматизированных системах окраски гистологических препаратов (при настройке протокола окраски следует немного завесить рекомендуемое минимальное время окраски, что обеспечит качественную обработку различных объектов после различных фиксаторов по одному протоколу).

Результат

В результате окраски гематоксилином ядра клеток приобретают синий цвет.