

Гематоксилин Карацци

Product Categories: [Красители](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/gistologicheskie-issledovaniya/krasiteli-gistologicheskie-issledovaniya/gematoksilin-karacci-2/>

Product Description

Гематоксилин Карацци

Фасовка: 1 л Назначение

Обеспечивает визуализацию ядер клеток в срезах (парафиновых, криостатных, вибротомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Предназначен для использования в качестве ядерного красителя при постановке иммуноцитохимических реакций в сочетании с различными типами хромогенов (в том числе и с растворимыми в этаноле) и для окраски гематоксилин-эозином. Достоинствами гематоксилина Карацци являются отличное и интенсивное окрашивание ядер клеток в срезах и большая устойчивость раствора красителя. Гематоксилин Карацци рекомендуют использовать для окраски гистологических срезов декальцинированной костной ткани.

Окрашивание можно проводить как прогрессивным, так и регрессивным способом. Продолжительность окраски при использовании прогрессивного способа для различных целей и объектов колеблется от 1 до 20 минут. При необходимости более длительной экспозиции и в случае регрессивного способа окраски может потребоваться разбавление основного раствора. Для этих целей рекомендуется использовать специально разработанный "Разбавитель гематоксилина", который обеспечит длительную сохранность рабочего раствора красителя.

Результат

В результате окраски гематоксилином ядра клеток приобретают синий цвет