

АНТИСТРЕПТОЛИЗИН-О (АСО)

Product Categories: [Ревматоидные заболевания](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/lateks-agglyutinaciya-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/revmaticheskie-zabolevaniya-lateks-agglyutinaciya-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/revmatoidnye-zabolevaniya/antistreptolizin-o-aso/>

Product Summary

Кат.№1031AVL100 Кат.№1031AVL250 Кат.№1031AVL500

Набор реагентов для определения АНТИСТРЕПТОЛИЗИНА-О методом латекс-агглютинации.

Product Description

Принцип метода

Реакция преципитации между антистрептолизином - О (АСО) в сыворотке и частицами латекса, сенсibilизированными стрептолизином – О стрептококка. В случае присутствия антистрептолизина - О в образце происходит агглютинация с образованием комплекса «антиген-антитело», в виде преципитата, наблюдаемого макроскопически.

Чувствительность теста — 200 МЕ/мл

Образцы для исследования: Сыворотка не липемическая и без гемолиза.

Хранение набора: 2-8°C

Срок годности набора при температуре 2-8°C: 2 года

Состав набора 1031AVL100

АСО-реагент — 1 мл

АСО-положительный контроль — 0,1 мл

АСО-отрицательный контроль — 0,1 мл

Дилуэнт 0,9% —

Слайд — 1 шт.

Палочки для смешения — 50 шт.

1031AVL250

АСО-реагент — 2,5 мл

АСО-положительный контроль — 0,25 мл

АСО-отрицательный контроль — 0,25 мл

Дилуэнт 0,9% — 5 мл

Слайд — 2 шт.

Палочки для смешения — 100 шт.

1031AVL500

АСО-реагент — 5,0 мл

АСО-положительный контроль — 0,25 мл

АСО-отрицательный контроль — 0,25 мл

Дилуэнт 0,9% — 5 мл

Слайд — 2 шт.

Палочки для смешения — 100 шт.