

# C-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК (СРБ)

Product Categories: [Ревматоидные заболевания](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/lateks-agglyutinaciya-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/revmaticheskie-zabolevaniya-lateks-agglyutinaciya-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/revmatoidnye-zabolevaniya/c-reaktivnyj-belok-srb/>

## Product Summary

Кат.№1033CVL100 Кат.№1033CVL250 Кат.№1033CVL500

Набор реагентов для определения С-реактивного белка методом латекс-агглютинации.

## Product Description

### C-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК (СРБ)

Принцип метода

Реакция преципитации между С-реактивным белком (СРБ) и частицами латекса, сенсibilизированными анти-СРБ антителами. В случае присутствия СРБ в образце, в результате агглютинации происходит образование комплекса "антиген-антитело", в виде преципитата, наблюдаемого макроскопически.

Чувствительность теста - 6 мг/дл

Образцы для исследования: Сыворотка не липемическая и без гемолиза.

Хранение набора: 2-8°C

Срок годности набора при температуре 2-8°C: 2 года

Состав набора

1033CVL100

СРБ-реагент - 1 мл

СРБ-положительный контроль - 0,1 мл

СРБ-отрицательный контроль - 0,1 мл

Дилуэнт 0,9% -

Слайд - 1 шт.

Палочки для смешения - 50 шт.

1033CVL250

СРБ-реагент - 2,5 мл

СРБ-положительный контроль - 0,25 мл

СРБ-отрицательный контроль - 0,25 мл

Дилуэнт 0,9% - 5 мл

Слайд - 2 шт.

Палочки для смешения - 100 шт.

1033CVL500

СРБ-реагент - 5,0 мл

СРБ-положительный контроль - 0,25 мл

СРБ-отрицательный контроль - 0,25 мл

Дилуэнт 0,9% - 5 мл

Слайд - 2 шт.

Палочки для смешения - 100 шт.