

Тест на системную красную волчанку (СКВ) антитела к ДНК

Product Categories: [Ревматоидные заболевания](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/immunodiagnostika/vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/lateks-agglyutinaciya-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/revmaticheskie-zabolevaniya-lateks-agglyutinaciya-immunologicheskie-issledovaniya-vizualnaya-interpretaciya-immunodiagnostika/revmatoidnye-zabolevaniya/test-na-sistemnyyu-krasnuyu-volchanku-skv-antitela-k-dnk/>

Product Summary

Кат.№1043S100VL

Тест на системную красную волчанку (СКВ) антитела к ДНК, методом латекс-агглютинации.

Product Description

Тест на системную красную волчанку (СКВ) антитела к ДНК Принцип метода

Реакция преципитации между латексными частицами, сенсibilизированными дезоксирибонуклеопротеинами (DNP), и анти-DNP антителами. В случае присутствия в образце анти-DNP антител, в результате агглютинации происходит образование комплекса «антиген-антитело», в виде преципитата, наблюдаемого макроскопически.

Образцы для исследования: Сыворотка не липемическая и без гемолиза.

Хранение набора: 2-8°C

Срок годности набора при температуре 2-8°C: 2 года

Состав набора 1043S100VL

СКВ-реагент — 1 мл

СКВ-положительный контроль — 0,1 мл

СКВ-отрицательный контроль — 0,1 мл

Дилуэнт 0,9% — 5 мл

Слайд — 1 шт.

Палочки для смешения — 50 шт.