

# Микро-КАЛИНА-НИЦФ набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама в модификации Калины

Product Categories: [По Граму](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/mikrobiologicheskaya-dagnostika/bakteriologiya/bakteriologicheskij-metod/krasiteli-bakteriologicheskij-metod/po-gramu/mikro-kalina-nicf-nabor-reagentov-dlya-okraski-mikroorganizmov-po-metodu-grama-v-modifikacii-kaliny/>

## Product Summary

Кат.№КМКГVL Микро-КАЛИНА-НИЦФ набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама в модификации Калины

Предназначен для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала, компонентами набора.

## Product Description

Микро-КАЛИНА-НИЦФ

набор реагентов для окраски микроорганизмов по методу Грама в модификации Калины

Предназначен для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов путем последовательной обработки мазка, взятого из биологического материала, компонентами набора. В соответствии с МУК 4.2.1887-04 «Лабораторная диагностика менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов», используется для лабораторной диагностики менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов. Менингококки, пневмококки, гемофильные палочки хорошо видны после окраски по Граму в модификации Калины. Грамотрицательные бактерии окрашиваются в ярко-розовый, грамположительные — в синий или черный цвет

СОСТАВ набора:

Раствор бриллиантового зеленого ....1 фл./100 мл

Раствор основного красителя .....1 фл./100 мл

Фуксин основной.....1 фл./10 мл

Этанол 30 % раствор.....1 фл./100 мл