Набор контрольных растворов белков, глюкозы и рН мочи

Product Categories: Контроль на белок, глюкозу, Контрольные материалы

Product Page:

http://ivdvlmedia.ru/shop/obshheklinicheskie-issledovaniya/fotometriya-obshheklinicheskie-issledovaniya/issledovanie-mochi/reflek tometriya-issledovanie-mochi/kontrolnye-materialy-reflektometriya-issledovanie-mochi/nabor-kontrolnyx-rastvorov-belkov-glyukoz y-i-rn-mochi/

Product Summary

Кат.№ К-БГ VL

Набор контрольных растворов белков, глюкозы и рН мочи предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче: по их реакции с пирогаллолом красным, с использованием диагностических тест-полосок; глюкозооксидазным методом, качественным по реакции Бенедикта, с использованием диагностических тест-полосок; рН мочи с использованием диагностических тест-полосок

4фл.х2 мл

*см. ниже подробное описание

Product Description

Набор контрольных растворов белков, глюкозы и рН мочи

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор контрольных растворов белков, глюкозы и pH мочи предназначен для контроля правильности и воспроизводимости результатов определения концентрации белков в моче: по их реакции с пирогаллолом красным, с использованием диагностических тест-полосок; глюкозооксидазным методом, качественным по реакции Бенедикта, с использованием диагностических тест-полосок; pH мочи с использованием диагностических тест-полосок

СОСТАВ КОНТРОЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

Стабилизированный раствор белка (70% альбумина и 30% глобулина) и глюкозы

СОСТАВ НАБОРА

4фл.х2 мл – белок в 4 флаконах в разных концентрациях, глюкоза одинаковая концентрация во всех флаконах ДИАПАЗОН КОНЦЕНТРАЦИЙ

Белок 0,1-1,5 г/л

КВ не более 7%

Глюкоза 4,5-6 ммоль/л

КВ не более 5%

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ НАБОРА

Срок годности набора при 2-8°C – 12 месяцев

Вскрытых флаконов при 2-8°C не более – 14 дней

ОБОРУДОВАНИЕ

Анализаторы, Спектрофотометры