

# АБСОЛЮЦИД ДИКВАТ

Product Categories: [Средства для поверхностей](#), [Средства для инструментария](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/postanaliticheskij-etap/moyushhie-i-dezinficiruyushhie-sredstva/sredstva-dlya-poverxnostej/absolyucid-dikvat/>

## Product Summary

Кат.№АДVL

Дезинфекция

Экономичный препарат (концентрат) широкой области применения с отличными моющими, дезодорирующими и дезинфицирующими свойствами на основе ЧАС. Рабочие растворы средства могут быть использованы многократно в течение 35 суток. Широкий спектр микробиологической активности (вкл. туберкулез, вирусы гепатитов и полиомиелита). Не фиксирует органические загрязнения. Оснащен точным дозатором и дозировочной таблицей.

Флакон 1л, канистра 5л.

## Product Description

АБСОЛЮЦИД ДИКВАТ

Сфера применения

Лечебно-профилактические учреждения

Парикмахерские, салоны красоты и др. предприятия индустрии красоты

Детские и образовательные учреждения

Предприятия общественного питания, торговли, транспорт

Ветеринария

Назначение

Дезинфекция медицинструментов, в т.ч. с ПСО

Дезинфекция поверхностей

Дезинфекция транспорта

Дезинфекция воздуха и систем вентиляции

Дезинфекция медицинских и биоотходов

Дезинфекция в стоматологии

Борьба с плесенью

Состав

алкилдиметилбензиламмония хлорида 4,9% и алкилдиметилэтилбензиламмония хлорида 4,9%, а также функциональные компоненты, в том числе буферные, стабилизирующие и антикоррозионные добавки. рН 1% рабочего раствора средства 7,0±1,0.

Срок годности

5 лет в невскрытой упаковке производителя

35 суток для рабочих растворов препарата

Текущая дезинфекция поверхностей

0,05% / 120 мин - бактерии

0,5% / 60 мин - вирусы, вкл. полиомиелит

0,5% / 90 мин - туберкулез

Генеральная уборка

0,05-1,5% - 15...120 мин

Инструменты

0,8% / 60 мин - ручной способ (с ПСО)

0,8% / 45 мин - механизированный способ (с ПСО)

#### Описание

«АБСОЛЮЦИД дикват» — экономичный препарат широкой области применения с отличными моющими и дезинфицирующими свойствами на основе комплекса четвертичных аммонийных соединений. Средство хорошо смешивается с водой, обладает моющими и дезодорирующими свойствами, не портит обрабатываемые объекты. Водные растворы средства имеют легкий специфический запах. Рабочие растворы средства могут быть использованы многократно в течение 35 суток, если их внешний вид не изменился. Средство сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания.

Препарат обладает широким спектром микробиологической активности против большинства болезнетворных микроорганизмов, включая туберкулез, вирусы гепатитов и полиомиелита. Не фиксирует органические загрязнения. «АБСОЛЮЦИД дикват» активно применяется в медицинских учреждениях (в том числе акушерско-гинекологического профиля, включая отделения неонатологии, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических, педиатрических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, станций переливания крови и скорой медицинской помощи и т.д.), в детских (школьных и дошкольных) учреждениях, на объектах социального обеспечения, предприятиях коммунально-бытового обслуживания, предприятиях общественного питания и торговли, образования, культуры, спорта, пищевой промышленности, парфюмерно-косметической промышленности, фармацевтической промышленности, на объектах ветеринарии.