

АБСОЛЮЦИД ЛИКВИД

Product Categories: [Средства для стерилизации](#), [Средства для поверхностей](#), [Средства для инструментария](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/postanaliticheskij-etap/moyushhie-i-dezinficiruyushhie-sredstva/sredstva-dlya-poverxnostej/absolyucid-likvid/>

Product Summary

Кат.№АЛVL

Дезинфекция+ДВУ+Стерилизация

Универсальный концентрированный препарат для дезинфекции, ДВУ и стерилизации на основе комбинации перекиси водорода, ПГМГ и ЧАС. Активен в отношении широкого спектра микроорганизмов, не фиксирует органические загрязнения, рабочий раствор может использоваться многократно в течение 15 суток

Флакон 1л с клапан-крышкой

Product Description

АБСОЛЮЦИД ЛИКВИД

Сфера применения

Лечебно-профилактические учреждения

Детские учреждения

Предприятия общественного питания

Назначение

Стерилизация медицинструментов и ИМН

ДВУ эндоскопов

Дезинфекция медицинструментов, в т.ч. с ПСО

Дезинфекция поверхностей

Дезинфекция транспорта

Дезинфекция воздуха и систем вентиляции

Дезинфекция медицинских и биоотходов

Дезинфекция в стоматологии

Борьба с плесенью

Состав

Пероксид водорода, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, алкилдиметилэтилбензиламмония хлорид, ПГМГ, а также функциональные добавки и вода. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства – $5,5 \pm 2,0$ ед.

Срок годности

2 года в невскрытой упаковке производителя

15 суток для рабочих растворов препарата

Текущая дезинфекция поверхностей

0,05% / 120 мин - бактерии

0,1% / 90 мин - вирусы, вкл.полиомиелит

0,7% / 90 мин - туберкулез

1,5% / 60 мин - анаэробы

Генеральная уборка

0,05-2,0% - 15...120 мин

Инструменты

1,0% / 45 мин - ручной способ (с ПСО)

1,0% / 20 мин - механизированный способ (с ПСО)

ДВУ ЭНДОСКОПОВ

6,0% / 5 мин

2,0% / 60 мин

Стерилизация

8,0% / 5 мин

4,0% / 30 мин

Описание

«АБСОЛЮЦИД ликвид» — современный универсальный дезпрепарат в форме жидкого концентрата на основе перекиси водорода, активированной четвертичным аммонийным соединением и ПГМГ. Обладает слабым запахом. Рабочие растворы средства могут быть использованы многократно в течение 15 суток, если их внешний вид не изменился.

Препарат обладает широким спектром микробиологической активности против большинства болезнетворных микроорганизмов, включая туберкулез, вирусы гепатитов и полиомиелита, анаэробной инфекции. Не фиксирует органические загрязнения.