

# АБСОЛЮПОЛ

Product Categories: [Предстерилизационная очистка](#), [Средства для оборудования](#), [Средства для поверхностей](#), [Средства для инструментария](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/postanaliticheskiy-etap/moyushhie-i-dezinficiruyushhie-sredstva/sredstva-dlya-poverxnostej/absolyupol/>

## Product Summary

Кат.№AVL

Дезинфекция

Универсальный высокоэффективный концентрированный препарат на основе смеси ЧАС (до 31%) для экономичной дезинфекции поверхностей и генуборки. Превосходные моющие свойства, активен в отношении широкого спектра микроорганизмов, не фиксирует органические загрязнения, рабочий раствор может использоваться многократно в течение 14 суток. Оснащен точным дозатором и дозировочной таблицей.

Флакон 1л, канистра 5л.

## Product Description

АБСОЛЮПОЛ

Сфера применения

Лечебно-профилактические учреждения

Парикмахерские, салоны красоты и др. предприятия индустрии красоты

Детские и образовательные учреждения

Предприятия общественного питания, торговли, транспорт

Ветеринария

Назначение

Дезинфекция поверхностей

Дезинфекция мединструментов, оборудования и ИМН, в т.ч. с ПСО

Предстерилизационная очистка

Дезинфекция медицинских и биоотходов

Дезинфекция в стоматологии

Дезинфекция транспорта

Состав

четвертичные аммонийные соединения в пересчете на алкилдиметилбензиламмоний хлорид -  $28\pm 3,0\%$ , а также функциональные компоненты, в том числе смесь аминов, буферные, стабилизирующие и антикоррозионные добавки.

Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора -  $9,5 \pm 1,5$ .

Срок годности

6 лет в невскрытой упаковке производителя

14 суток для рабочих растворов препарата

Текущая дезинфекция поверхностей

0,05% / 120 мин - бактерии

0,5% / 60 мин - вирусы, вкл.полиомиелит

0,8% / 90 мин - туберкулез

Генеральная уборка

0,1-1,0% / 60 мин

## Инструменты

0,5% / 90 мин - ручной способ (с ПСО)

1.0% / 30 мин - механизированный способ (с ПСО)

## Описание

«АБСОЛЮПОЛ» — высококонцентрированное дезинфицирующее средство на основе ЧАС (28%), разработанное для высокоэффективной и экономичной дезинфекции поверхностей в различных областях, генеральной уборки, предстерилизационной очистки изделий медназначения, совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией, ручным или механизированным способами, дезинфекции биологического материала.

Рецептурная активация позволила получить не только низкие бактерицидные и фунгицидные концентрации, но и обеспечила надежную дезинфекцию против вирусов и туберкулеза при низких концентрациях. Так, например, режим генеральной уборки в туберкулезных ЛПУ – 1% 60 минут, в хирургических отделениях – 0,5% 60 минут, в соматических – 0,1% 60 минут.

В 2009 году разработано и утверждено дополнение к основной инструкции по применению, позволяющее производить дезинфекцию биологического материала.

«АБСОЛЮПОЛ» первый и пока единственный дезинфицирующий препарат на отечественном рынке, который сочетает в себе не только высокую антибактериальную активность при низких концентрациях (от 0,04%), но и удобство при работе со средством.

Практика проведения дезинфекционных работ показывает сложность приготовления рабочих растворов дезсредств с низкими концентрациями. Для решения этой проблемы «АБСОЛЮПОЛ» оснащен высокоточным дозатором, мерной шкалой и дозировочной таблицей, которые упрощают процесс приготовления растворов с концентрациями от 0,04% и позволяют в полной мере использовать экономичность дезсредства.

Кроме того, наличие дозатора и дозировочной шкалы непосредственно на этикетке позволяют приготовить раствор правильной концентрации в любых производственных условиях.