

# ЖАВЕЛЬ АБСОЛЮТ

Product Categories: [Средства для поверхностей](#), [Средства для инструментария](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/postanaliticheskij-etap/moyushhie-i-dezinficiruyushhie-sredstva/sredstva-dlya-poverxnostej/zhavel-absolyut/>

## Product Summary

Кат.№ЖАДСVL

Дезинфекция

Быстрорастворимые хлорные таблетки на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты (84,0%), содержащие в своем составе компоненты, способствующие активации и лучшему растворению средства.

Банка 300 таблеток, банка 320 таблеток, банка 100 таблеток

## Product Description

ЖАВЕЛЬ АБСОЛЮТ

Сфера применения

Лечебно-профилактические учреждения

Предприятия общественного питания, торговли, транспорт

Объекты ветеринарного контроля

Назначение

Дезинфекция поверхностей

Дезинфекция изделий медназначения

Дезинфекция транспорта

Дезинфекция медицинских и биоотходов

Состав

Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (до 84%), адипиновая кислота, карбонат, бикарбонат натрия и др. Таблетка массой 3,4-3,5 грамма, выделяет при растворении в воде не менее 1,5 грамм активного хлора.

Срок годности

6 лет в невскрытой упаковке производителя

5 суток для рабочих растворов препарата

Текущая дезинфекция поверхностей (% по активному хлору)

0,015% / 60 мин - бактерии, вирусы, вкл.полиомиелит

0,06% / 60 мин - туберкулез

1,2% / 60 мин - анаэробы

Генеральная уборка

0,015-0,1% / 30...60 мин

Изделия медназначения

0,06% / 90 мин - вирусы

0,2% / 60 мин - туберкулез

2,0% / 120 мин - анаэробы

Особо опасные инфекции

0,06-2,0% / 120 мин

Описание

«Жавель АБСОЛЮТ» обладает максимально широким антимикробным действием: эффективен против грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая туберкулёз), вирусов (в том числе полиомиелит, ВИЧ, гепатиты, птичий грипп, атипичная пневмония, аденовирус и др.); грибов рода Кандида, дерматофитов и др.; особо опасных инфекций (чума, холера, туляремия и т.п.), включая споровые формы сибирской язвы; анаэробной инфекции.