
# Индикаторы серии «ИНТЕСТ» (НПФ «ВИНАР», Россия)

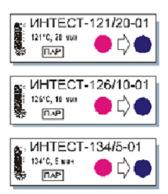

Product Categories: Индикаторы паровой стерилизации

Product Page:

http://ivdvlmedia.ru/shop/prinadlezhnosti/postanaliticheskij-etap/sterilizaciya/kontrol-sterilizacii-sterilizaciya/indikatory-parovoj-sterilizacii-kontrol-sterilizacii-steril

# **Product Summary**

Кат.№ИКПСИTVL

Индикаторы серии «ИНТЕСТ» (НПФ «ВИНАР», Россия)

Предназначены для контроля всех критических параметров паровой стерилизации как в КАМЕРЕ стерилизатора, так и ВНУТРИ стерилизуемых упаковок при "коротких" режимах в форвакуумных стерилизаторах

# **Product Description**

Индикаторы серии «ИНТЕСТ» (НПФ «ВИНАР», Россия)

Предназначены для контроля всех критических параметров паровой стерилизации как в КАМЕРЕ стерилизатора, так и ВНУТРИ стерилизуемых упаковок при "коротких" режимах в форвакуумных стерилизаторах

Интест-П-121/20 (500 тестов)	Самоклеющийся, снаружи/внутри упаковки
Интест-П-121/20 (1000 тестов)	Самоклеющийся, снаружи/внутри упаковки
Интест-П-126/10 (500 тестов)	Самоклеющийся, снаружи/внутри упаковки
Интест-П-126/10 (1000 тестов)	Самоклеющийся, снаружи/внутри упаковки
Интест-П-134/5 (500 тестов)	Самоклеющийся, снаружи/внутри упаковки
Интест-П-134/5 (1000 тестов)	Самоклеющийся, снаружи/внутри упаковки
Интест-ПФ-В (500 тестов)	Самоклеющийся, внутри упаковки
Интест-ПФ-Н1 (500 тестов)	Самоклеющийся, снаружи упаковки

Product data have been exported from - <u>ВЛ-Медиа</u> Export date: Thu Oct 30 22:28:46 2025 / +0000 GMT

Интест-ПФ-Н2 (500 тестов) Самоклеющийся, снаружи упаковки

Интест-ПФ-НЗ (500 тестов) Самоклеющийся, снаружи упаковки

Тип индикатора Класс Температура стерилизации, °С Давление пара, МПа Стерилизационная выдержка, мин

ИНТЕСТ-П-121/20

4 121 ± 1

 $0.11 \pm 0.01$ 

20+2

ИНТЕСТ-П-126/10

4

 $126 \pm 1$ 

 $0.14 \pm 0.01$ 

10+1

ИНТЕСТ-П-134/5

4

 $134 \pm 1$ 

 $0.21 \pm 0.01$ 

5+1

Индикаторы ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ химические одноразовые ИНТЕСТ-П-121/20, ИНТЕСТ-П-126/10, ИНТЕСТ-П-134/5 выпускаются в соответствии с ТУ 9398-041-11764404-2003 и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара: В СТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ КАМЕРЕ И ВНУТРИ ИЗДЕЛИЙ И УПАКОВОК, в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом многоступенчатого вакуумирования.

Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые (далее индикаторы) «ИНТЕСТ-ПФ» выпускаются в соответствии с ТУ 9398-049-11764404-2005 и предназначены для оперативно-го визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – темпера-туры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах по ГОСТ Р 51935-2002 (EN285-95) и EN 13060-2004. Индикаторы «ИНТЕСТ-ПФ-В» предназначены для контроля условий внутри стерилизуемых упаковок и изделий медицинского назначения (ИМН) при любых режимах паровой стерилизации.

Индикаторы «ИНТЕСТ-ПФ-В» также могут использоваться для контроля условий паровой стерилизации в стерилизационной камере при стерилизации неупакованных изделий в режимах 121+3оС 15 минут и 134+3оС 3,5 минуты.

Обозначение

индикатора

Режим стерилизации

## Расположение индикатора при контроле

#### Контрольные значения индикатора

T, oC

Давление

пара, МПа

Время,

МИН

Температура, оС

Время вы-держки, мин

#### ИНТЕСТ-ПФ-В

121+3

134+3

0,110+0,020

0,210+0,030

Bce

режимы

Внутри изделий и упаковок

121

134

15

3

#### ИНТЕСТ-ПФ-Н1

121+3

134+3

0,110+0,020

0,210+0,030

20+3

4+0,5

## Снаружи изделий и упаковок

121

134

20

4

## ИНТЕСТ-ПФ-Н2

121+3

134+3

0,110+0,020

0,210+0,030

25+3

5+0,5

#### Снаружи изделий и упаковок

121

134

25

5

#### ИНТЕСТ-ПФ-Н3

Product data have been exported from -  $\underline{\rm BJ-Meдиa}$  Export date: Thu Oct 30 22:28:46 2025 / +0000  $\,$  GMT

121+3 134+3 0,110+ 0,020 0,210+0,030 35+3 7+0,5 Снаружи изделий и упаковок 121 134

35 7

Индикаторы «ИНТЕСТ-ПФ-Н1», «ИНТЕСТ-ПФ-Н2» «ИНТЕСТ-ПФ-Н3» предназначены для контроля условий снаружи упаковок и изделий в камере паровых стерилизаторов при соответствующих режимах, приведенных в таблице Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1.