

# РеаЛейден - тест

Product Categories: [Протеин С](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/fiziologicheskie-antikoagulyanty/protein-s-fiziologicheskie-antikoagulyanty/realejden-test/>

## Product Summary

Кат. № ПФА-4VL  
20 определений

Набор реагентов для определения резистентности фактора V к протеину С.

## Product Description

РеаЛейден - тест

Состав набора:

АЧТВ-реагент с активатором протеина С, лиофильно высушенный (2,0 мл) – 1 флакон;

АЧТВ-реагент, лиофильно высушенный (2,0 мл) – 1 флакон;

0,025 М раствор кальция хлористого (5,0 мл) – 1 флакон.

Плазма-калибратор, лиофильно высушенная (1,0 мл) – 1 флакон;

Плазма субстратная дефицитная по фактору V, лиофильно высушенная (1,0 мл) – 4 флакона;

20 определений.

Инкубация нормальной плазмы с активатором протеина С и с контактным активатором вызывает активацию эндогенного протеина С и коагуляционного каскада по внутреннему механизму. Процесс свертывания запускается при добавлении ионов кальция. Активированный протеин С совместно с эндогенным протеином S инактивирует прокоагулянтные кофакторы VIIIa и Va, что удлиняет время свертывания плазмы в тесте АЧТВ. В плазме больных, содержащей ф.V, резистентный к действию активированного протеина С, время свертывания при добавлении активатора удлиняется в значительно меньшей степени.